



## Artikel-Nr. 26474, Hygienebox

### Paketinhalt

| Menge | Artikel-Nummer | Artikelbeschreibung                                                     |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1x    | 26473          | Aufbewahrungsbox, Really Useful, 64 l, transparent                      |
| 3x    | 25262          | Allzweckhandschuhe Latex, gelb, puderfrei, Gr. M, 1 Paar                |
| 3x    | 25263          | Allzweckhandschuhe Latex, gelb, puderfrei, Gr. L, 1 Paar                |
| 1x    | 10413          | Atemschutzmaske FFP2, mit Ventil, 10 Stück                              |
| 1x    | 294            | Einwegschrürzen weiß, 125x70 cm, 100 Stück                              |
| 1x    | 293            | Überschuhe blau, 40my, 1 Beutel mit 100 Stk.                            |
| 1x    | 19573          | Spuckbeutel, 1500 ml, 25 Stk.                                           |
| 1x    | 305            | Optan Kotzpulver, Bindemittel für Erbrochenes, 1l                       |
| 1x    | 24651          | Satino PureSoft 100% Recycling Küchenrolle, 64 Blatt, 4 Rollen, 2 lagig |
| 1x    | 597            | Müllbeutel 60l, mit Zugband, grün, Dicke 20 my, 1x20 Stück              |
| 1x    | 19598          | Microfasertuch frotty grün, 40x40 cm, 20 Tücher                         |
| 1x    | 970            | Optisept Flächendesinfektion (Dr. Schumacher), RKI gelistet, 1l         |
| 2x    | 3673           | Haushaltseimer mit Bügel, 5 Liter                                       |
| 1x    | 5535           | Cleanisept Wipes (Dr. Schumacher), VAH zert., 1x100 Tücher              |
| 1x    | 768            | Bode Sterillium® Virugard® Händedesinfektion, RKI, 500 ml               |

## Desinfektionsmittelkonzentrat

# OPTISEPT®

## Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

- Zur Desinfektion im Seuchenfall gem. RKI
- Viruzide Wirksamkeit
- Reinigungsstark



### Produktbeschreibung

OPTISEPT ist ein Kombinationspräparat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar, Medizinprodukten sowie Flächen aller Art in allen medizinischen Bereichen. Das Präparat besitzt ein umfassendes Wirkungsspektrum und ist daher geeignet zur Desinfektion im Seuchenfall gem. RKI sowohl für den Wirkungsbereich A (Bakterien, Pilze) als auch für den Wirkungsbereich B (Viren). OPTISEPT enthält nur geringe Anteile von leicht flüchtigen Aldehyden. Daher wird in den Anwendungskonzentrationen gem. VAH eine Geruchsbelästigung vermieden. OPTISEPT ist flexibel und wirtschaftlich einsetzbar: Im Seuchenfall wird lediglich die Anwendungskonzentration auf die vom RKI empfohlenen Werte erhöht. Somit wird der Einsatz eines zweiten Präparates vermieden.

### Anwendungsgebiete

**Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR):** Flächendesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art.

**Gem. EU-Medizinprodukteverordnung:** Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven alkoholempfindlichen Medizinprodukten.

| Wirksamkeiten und Prüfmethode                                               |              |                              | 5 min | 15 min | 30 min | 60 min | 240 min |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Bakterien und Pilze</b>                                                  |              |                              |       |        |        |        |         |
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid)*       | VAH/EN 16615 | mit Mechanik, hohe Belastung |       | 1 %    | 0,5 %  | 0,5 %  |         |
| tuberkulozid (M.terrae)                                                     | EN 14348     | niedrige Belastung           |       |        |        | 4 %    |         |
| Desinfektion im Seuchenfall: Bakterien inkl. Mykobakterien, Pilze und Viren | RKI          | Wirkungsbereich AB           |       |        |        |        | 7 %     |
| <b>Viren</b>                                                                |              |                              |       |        |        |        |         |
| viruzid                                                                     | EN 14476     | hohe und niedrige Belastung  |       |        |        | 4 %    |         |
| begrenzt viruzid                                                            | EN 14476     | hohe Belastung               |       |        |        | 0,5 %  |         |
| wirksam gegen Polioviren                                                    | EN 14476     | hohe und niedrige Belastung  |       |        |        | 4 %    |         |
| wirksam gegen Adenoviren                                                    | EN 14476     | hohe und niedrige Belastung  |       |        |        | 4 %    |         |
| wirksam gegen Noroviren (MNV)                                               | EN 14476     | hohe und niedrige Belastung  |       |        |        | 3 %    |         |
| <b>ergänzende Wirksamkeitsangaben</b>                                       |              |                              |       |        |        |        |         |
| viruzid                                                                     | RKI/DVV      |                              |       |        |        | 2 %    |         |
| wirksam gegen Polioviren                                                    | RKI/DVV      |                              |       |        |        | 2 %    |         |
| wirksam gegen Adenoviren                                                    | RKI/DVV      |                              |       |        | 1 %    |        |         |
| wirksam gegen Polyoma/SV40-Viren                                            | RKI/DVV      |                              |       |        | 2 %    | 1 %    |         |
| wirksam gegen Parvoviren                                                    | RKI/DVV      |                              |       |        | 2 %    | 1 %    |         |
|                                                                             | RKI**        |                              |       |        |        |        | 2 %     |

\* einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

\*\* praxisnaher Keimträgerversuch nach Richtlinie RKI (Bundesgesundhbl. 38 (1995) 242)



## OPTISEPT®

### Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion und Reinigung

#### Anwendung

Flächenwischdesinfektion: Die zu desinfizierende Fläche mit einer ausreichenden Menge der frisch angesetzten **OPTISEPT** Gebrauchslösung vollständig benetzen, diese mechanisch verteilen und abtrocknen lassen (Scheuer-Wisch-Desinfektion). In der Routineanwendung können die desinfizierten Flächen unmittelbar nach der Abtrocknung wieder genutzt werden.

Gemäß EU-Medizinprodukteverordnung sind Anwender/Patienten verpflichtet, alle im Zusammenhang mit diesem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/Patient niedergelassen ist, zu melden.

#### Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 3,5 g Formaldehyd, 9,6 g Glyoxal, 2,5 g Glutaral, 8 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

#### Gutachten

Unsere Produkte sind vollumfänglich begutachtet. Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne unsere Gutachtenmappe zur Verfügung.

#### Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. Kann Krebs erzeugen. Kann die Atemwege reizen. Sehr giftig für Wasserorganismen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Wirkt ätzend auf die Atemwege. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Nur für den berufsmäßigen Verwender.

| Produkt      | Gebinde             | Inhalt                | VE | Art. Nr.      | PZN      |
|--------------|---------------------|-----------------------|----|---------------|----------|
| OPTISEPT     | Dosierflasche       | 1 L                   | 10 | 00-205-010    | 05381047 |
|              | Kanister            | 5 L                   | 3  | 00-205-050    | 05381136 |
|              | Kanister            | 10 L                  | 1  | 00-205-100    | -        |
| Dosierhilfen | Dosierflasche 1 L   | Dosierung: 25 - 60 ml | 1  | 00-904-010    | -        |
|              | Kanisterdosierpumpe | 2 L/5 L/10 L          | 1  | 00-906-000-01 | -        |
|              | Kanisterumfüllhahn  | 2 L/5 L/10 L          | 1  | 00-907-000    | -        |
| Zubehör      | Kanisterschlüssel   | -                     | 1  | 00-909-050    | -        |

CE 0482



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH. [www.schumacher-online.com](http://www.schumacher-online.com)