



# DESIFOR-ONE

## Flächendesinfektion • begrenzt viruzid

### Einsatzbereich

Zur Desinfektion wasserfester Oberflächen und Böden in medizinischen Einrichtungen, in Schulen, Kindergärten und Heimen sowie in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, öffentlichen Einrichtungen.

### Anwendung

Fläche mit DESIFOR-ONE V - Anwendungslösung wischen bzw. flächendeckend auftragen. Flächen und Arbeitsgeräte, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen. Zur Dosierung einer 2%igen Lösung legen Sie 980 ml kaltes Wasser vor und geben 20 ml DESIFOR-ONE V dazu. Bitte beachten Sie, die Dosierkugel hat keine Markierung, wenn die Dosierkugel gefüllt ist entspricht es 20 ml.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Bakterizid, levurozid (Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen)	2,0 % 15 Min.	EN 1276, EN 1650, EN 13697, Hohe Belastung
Bakterizid, levurozid (Humanmedizinischer Bereich)	2,0 % 15 Min.	EN 13727, EN 13624, EN 13697 Hohe Belastung
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	2,0 % 15 Min.	EN 14476, Hohe Belastung

### Produkteigenschaften

- Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid
- Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV, Coronaviren)
- Frei von Aldehyden
- Frei von Duft- und Farbstoffen
- Exzellente Reinigungseigenschaften
- Anwendung mit gebrauchsfertigem Tuch: DESIFOR-ONE WIPES (EN 16615, 4-Felder-Test)

### Hinweise

Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre. Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre. Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Technische Informationen

Karton mit 12 Fl. à 1 Liter  
inkl. 20 ml Kleindosierer  
Kanister à 10 Liter

Art.-Nr. 20485

Art.-Nr. 20480

### Wirkstoffe

100 g enthalten 10,0 g Benzalkoniumchlorid;  
9,0 g 2-Phenoxyethanol


Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung  
1272/2008(CLP): Gefahr; GHS05, GHS09

BAuA Reg.-Nr. N-89666

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch  
stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Passendes Zubehör finden Sie auf unserer Website:



Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.  021

pH conc 

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

**DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA**  
Taanusstraße 19 · 80807 München  
Tel. +49 89 3506080  
info@dr-schnell.de  
www.dr-schnell.com

*Wir leben Hygiene*  
**DR.SCHNELL**  
QUALITÄT UND SERVICE